

Anytime 4系列 快速入门指南

安耐糖 Anytime
持续葡萄糖监测系统

全国服务电话：400-868-2223

组成部分



① 准备工作

第一步 下载软件

- 打开手机蓝牙
- 微信扫描下方二维码下载APP或更新APP
- 按照提示登录



第二步 发射器充电

- 将发射器放入充电座内充电，白色灯闪烁(代表充电中)。
- 等待指示灯变蓝(代表满电),取出发射器。



② 设备连接

第一步 连接发射器

在APP“连接发射器”页面，选择发射器对应的SN号，完成连接。



第二步 连接传感器


在APP页面，扫描传感器塑壳上的二维码。



③ 传感器植入

第一步 选择植入部位


选择腹部植入(肚脐斜上方5厘米左右位置，图中虚线区域)，避开腰带、疤痕、肋骨。
用酒精片消毒，晾干后进行下一步。

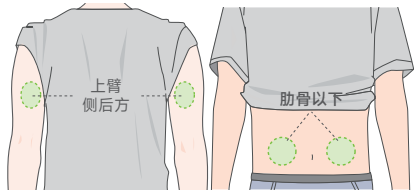

如佩戴上臂，请选择上臂侧后方

第二步 撕保护膜


撕下2片保护膜。

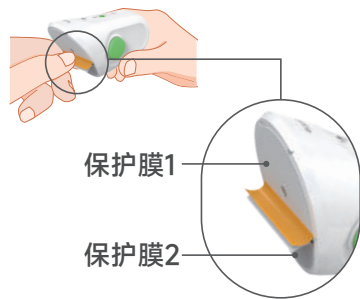

请勿打开安全锁，以防提前触发

第三步 紧贴选取位置


将传感器紧贴植入位置。

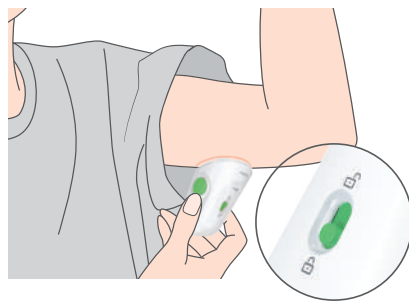

请勿打开安全锁，以防提前触发

第四步 解锁

滑动安全锁解锁。

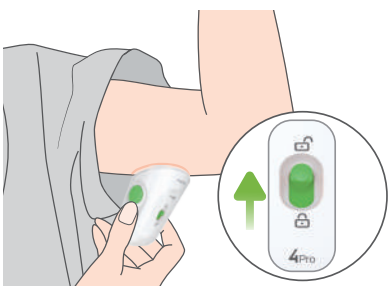

第五步 植入

同时按下两侧按钮，直至听到“咔”声。



第六步 移除助针器

缓慢移除传感器的助针器部分，完成植入。



④ 发射器安装

第一步

★ 重要步骤

将发射器按照下图所示的角度，扣合到传感器上。




第二步


如下图方式用力捏合发射器和传感器，直至听到“咔”声。



1

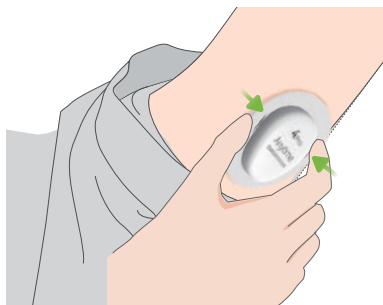

2

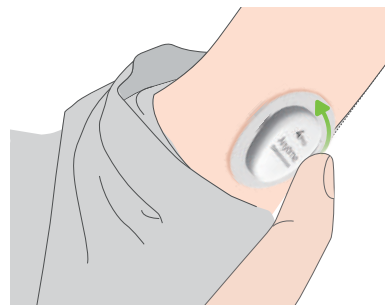

⚠ 反向轻推发射器确认是否锁紧。


⑤ 软件界面

APP至初始化结束后开始显示血糖值。



最近一次血糖值和测量时间
发射器和APP连接状态

血糖曲线

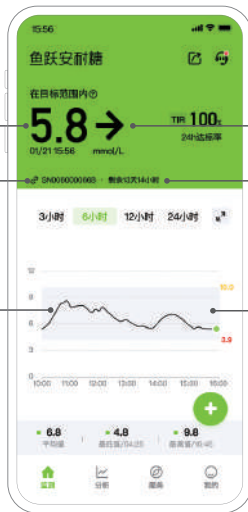

趋势箭头

本轮佩戴的剩余时间

此区域表示在设置目标范围内，其余表示超出目标范围

停止监测 取下设备

连同胶布与设备，整体从佩戴部位缓慢撕下。



取下后，向下掰开卡扣，滑开发射器。



⚠ 发射器立刻充电


⚠ 避免误扔发射器



发射器

传感器

传感器作为医疗废弃物处理。

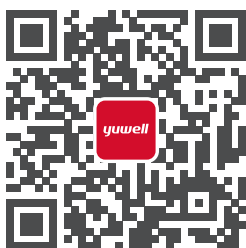

江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司
丹阳市开发区百胜路1号5号楼
文件编号：YK-B3-CGM16-094
版 本：V20250415

编制日期：20250415

关注公众号享更多健康服务